

Narcontrol

Test antidrogas ràpido para revelar 6 drogas sobre cualquier superficie sòlida y tambièn en la orina.

Distribuido por EVOPHARM, etc. etc.

USO:

Narcontrol es un test inmunocromatogràfico para la b̀squeda ràpida de varias drogas, algunas sustancias sicotròpicas y sus principales metabolitos en la orina humana y sobre las superficies.

Es un instrumento que obra por contraste y si no hay droga sobre las tiras del instrumento aparecen dos lineas rojas. Si hay presencia de drogas en la muestra examinada, aparece sòlo una linea.

El sistema de control està formado por 6 tiras, cada una de las cuales sirve para individuar una tipologia de droga, armadas sobre un soporte de plastico.

A seguir los tipos de droga y las cantidades que el test permite revelar:

Abreviaciòn / Droga/ Medida

Abreviaciòn	Droga	Medida
AMP	Anfetamina	1000 ng/ml
COC	Cocaina / Benzoilecgonina	300 ng/ml
MET / MAMP	Metanfetamina	1000 ng/ml
OPI / MOR / MOP	Opiaceos / Morfina	300 ng/ml
THC	Marijuana / Cannabis	50 ng/ml
XTC	Ecstasys	1000 ng/ml

Preparaciòn:

El dispositivo (en estuche cerrado), las muestras y los controles deben encontrarse a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de comenzar.

No abra el sobre antes que todo està listo.Saque el dispositivo del sobre y marquelo con el nombre del paciente o un codigo de control.

Test sobre superficies solidas:

“IMAGEN 1 ” 1. Pase varias veces las tiras sobre la superficie de un objeto estrictamente personal y de contacto frecuente (por ejemplo las llaves, cepillo de dientes, anteojos, reloj, etc.)

2. Vierta el liquido reactivo del frasco en dotaciòn en la tapa del estuche del test, hasta llenarlo.

“IMAGEN 2 ” 3. Cierre Narcontrol lentamente y con cui dado.

4. Espere que aparezcan las lineas rojas sobre la membrana y lea los resultados despuès de 5 minutos y no màs tarde de 15 minutos, como explicado en el paragrafo “ interpretaciòn de los resultados ”

Test en orina :

“IMAGEN 3 ” 1. Quite la tapa de protecciòn del dispositivo e inmerga las tiras en orina por almenos 10 segundos, poniendo atenciòn que la orina no toque la parte del test marcada con la indicaciòn MAX. Si esto sucede, el test viene invalidado.

“IMAGEN 4” 2. Saque las tiras de la orina solo cuando aparezcan las lineas de control de cada paràmetro.. Espere almenos hasta vere l color rojo en cada ventanilla de control. Esto garantiza que la justa cantidad de orina fuè absorbida para la correcta aplicaciòn del test.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:

4 IMAGENES

Negativo: dos lineas coloradas aparecen en las ventanillas de control.

La linea en la zona del test (T) es la linea de estudio de la droga; la linea en la regiòn de control (C) es la linea de control, e indica la correcta aplicaciòn del test. La intensidad del color de la linea del test (T) puede ser màs debil o màs intensa respecto a la linea de control. En las imàgenes al lado se muestra como se presenta la zona de reacciòn (a y b).

En muchos casos las lineas de control (C) y de test (T) presentan la misma intensidad de color, como muestra la figura 1

Positivo: aparece sòlo una linea en la zona de control (C). La ausencia de la linea de test indica resultado positivo.

Nota importante: no todos los parametros deben ser positivos al mismo tiempo en un test. Examine por separado cada zona de reacciòn o parametro.

No valido : si no aparece ninguna linea en la ventanilla de control. El test o el respectivo parametro no es valido y el test debe ser repetido.

Material suministrado:

1 frasco de reactivo

1 Narcontrol

1 manual de instrucciones

Precauciones:

Solo para uso in vitro

Solo para uso profesional

- Monouso.
- Para evitar contaminaci3n no toque la parte final de las tiras
- No sumergir las tiras de revelaci3n de drogas por encima del nivel maximo de inmersi3n
- Mantener sumergido el test para la orina hasta que no aparezcan una o dos rayas rojas en la zona de reacci3n (alrededor de 15 segundos)
- Evitar la contaminaci3n cruzada de muestras de orina usando para cada maestra una nueva serie de test antidrogas y probetas
- No derrame las muestras sobre la zona de reacci3n
- Las muestras pueden ser infecciosas
- Use materiales adaptos
- No use Narcontrol test antidrogas luego de la fecha de vencimiento
- No use Narcontrol test antidrogas si la confecci3n no esta sellada.
- Use el test inmediatamente despues de abrir la confecci3n
- Tener en cuenta para la evaluaci3n del test de la especificidad y de las reacciones cruzadas